

Icare Home II



Sistema innovativo per una misurazione della pressione intraoculare precisa, che minimizza il fastidio.



Tonometria

Dispositivo all'avanguardia per misurare la pressione intraoculare, semplice e di piccole dimensioni facilmente trasportabile. ICare HOME2 è progettato per pazienti affetti da glaucoma che necessitano di un monitoraggio regolare della IOP.

Il dispositivo si basa sul principio di misurazione del rimbalzo e quindi non è necessario alcun anestetico o soffio d'aria. Sistema di posizionamento intelligente per il corretto allineamento del tonometro tramite Smart Light Guide.

Affidabile, preciso e facile da usare

1. **Posizionare** il tonometro in verticale per inserire l'adattatore per la sonda
2. **Far scivolare** la sonda in modo sterile all'interno dell'imbuto
3. **Posizionare** il dispositivo al centro dell'occhio
4. **Mantenere** la posizione e premere il tasto per eseguire 6 misurazioni per occhio

Caratteristiche

-  **Sonda monouso e sterile:** facile da installare e rimuovere.
-  **Comodo e poco fastidioso:** per il paziente utilizzabile sia da seduti che da supini fino a 200 gradi.
-  **Rapidità dell'esito:** risultati in pochi secondi.
-  **Display user friendly:** per aiutare la corretta esecuzione dell'esame e segnala eventuali errori tramite avvisi sia visivi e sonori.

-  Senza collirio
-  Risultati disponibili sullo schermo
-  6 misurazioni per occhio
-  Sistema riconoscimento errori