

Holter Pressorio WBP - 02A



Il primo Holter Pressorio in Europa completamente senza cavi.



Monitoraggio ambulatoriale pressione arteriosa

L'Holter Pressorio è un esame utile al monitoraggio del trend pressorio del paziente ed è in grado di effettuare misurazioni della pressione arteriosa ad intervalli regolari per 24h o 48h.



No batteria



Fino a 48h di registrazione



Senza cavi



Identifica i movimenti del paziente

Caratteristiche



Dispositivo completamente indossabile:
sul braccio rende l'esame confortevole e ne aumenta accuratezza e riproducibilità.



Sistema di gonfiaggio innovativo:
rende la misurazione più sensibile e quindi meno invasiva e fastidiosa.



Installazione rapida:
in pochi secondi e senza cavi per garantire una maggiore igiene per il paziente.



Riconosce la posizione del paziente:
grazie ad accelerometro e giroscopio interno riconosce i movimenti del paziente ad ogni misurazione per un'interpretazione più corretta da parte del cardiologo.

raccomandato da



La rivoluzione nella misurazione della pressione

1.

Posizionamento del bracciale in posizione sul braccio non dominante

2.

Accensione del dispositivo e avviamento della registrazione

3.

Smontaggio dell'Holter Pressorio al termine dell'esame e invio dei dati per la refertazione

4.

Ricezione del referto specialistico della centrale di refertazione mediamente in 24 ore.